



## INSTRUÇÕES DE USO

### **CONTATO ESTÉRIL** **Gel Estéril para Ultrassom**

**Indicações:** O **CONTATOESTÉRIL – Gel Estéril para Ultrassom** foi desenvolvido para uso de tecnologias baseadas em ondas de ultrassom, onde a esterilidade é indicada.

**Mecanismo de Ação:** Gel para uso como meio de contato para a transmissão de impulsos elétricos entre a pele do paciente e o equipamento de ultrassom.

**Esterilização:**

Esterilizado por raios gama.

A esterilização é assegurada enquanto a embalagem não for danificada, aberta ou molhada.

**Modo de Uso:**

- 1) Higienize a área com técnica asséptica onde será realizado o procedimento.
- 2) Abra a embalagem do gel no momento do uso seguindo os protocolos de procedimentos estéreis.
- 3) Aplicar uma fina camada do gel estéril sobre a superfície do transdutor e não diretamente na pele;
- 4) Após a realização do procedimento, remova o gel do local do procedimento caso seja necessário;
- 3) Elimine o produto após a utilização.

**Advertências e Precauções:**

Para evitar a contaminação devem ser observadas práticas estéreis.

Não utilizar o produto se a embalagem estiver violada, manter a embalagem íntegra e protegida da umidade em local fresco e ao abrigo da luz.

Não reutilizar ou reprocessar o produto.

Produto exclusivo para a condução de impulsos elétricos.

Não utilize em pacientes com sensibilidade conhecida a qualquer um dos componentes da formulação.

O gel **CONTATOESTÉRIL** destina-se a uma única utilização. A reutilização do produto pode gerar contaminações, reações adversas e risco ao paciente.

Não ingerir, se ingerido tomar água em abundância e procurar orientação médica.

Manter fora do alcance de crianças.

Não utilizar nas áreas dos olhos e/ou mucosas.

**Contraindicações:** É contraindicado para pacientes que apresentam alguma reação alérgica ou hipersensibilidade a qualquer componente da fórmula.

**Condições de armazenamento/ transporte/ manipulação:** Manter sempre em sua embalagem original, em local seco e temperatura ambiente. Não expor o produto à luz direta e umidade.

**Composição:** Água, Polímero Carboxivinílico, Fenoxietanol/Benzoato de Sódio, EDTA Dissódico, Monoisopropanolamina.

**Prazo de Validade:** 3 anos a partir da data de fabricação.

Fabricado por: RMC INDÚSTRIA BRASILEIRA DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI  
CNPJ: 04.716.276.0001-21

Rua Ramira Moreira Siqueira, 239 – Jd. Moreirinha – Amparo- SP – Brasil

Farmacêutico responsável: Dr. Alessandro de O. Facca CRF/SP 25.319

Registrado ANVISA Nº. 80122200017. Aut. Func.8012220